


# Mepiform®

Effektivt självhäftande förband för ärrbehandling

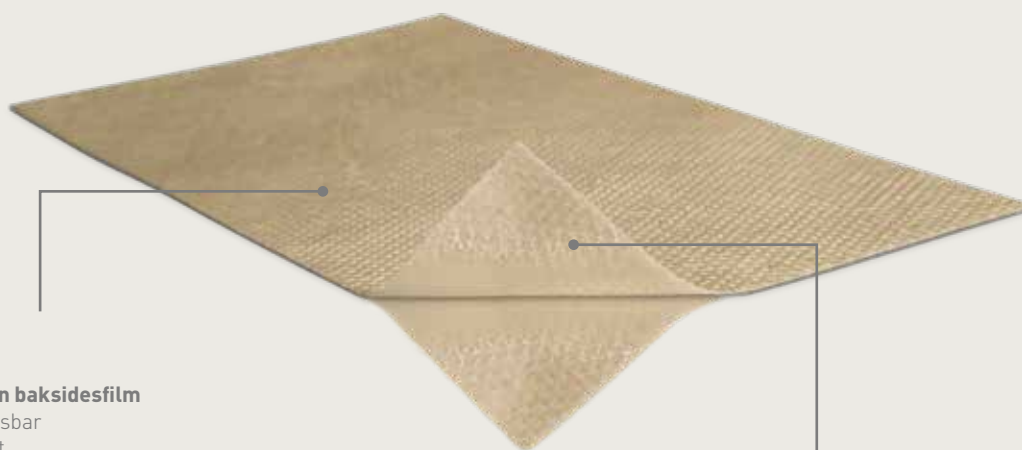


#### Nonwoven baksidesfilm

- Andningsbar
- Vattentät

#### Safetac® yta

- Vidhäftning med mjukt silikon
- Minskar smärta och vävnadsskada vid avlägsning!

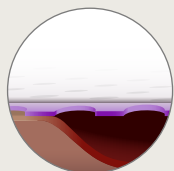

#### Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.




- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten<sup>1,2,3</sup>
- Ingen extra fixering krävs
- Formar sig väl efter kroppen konturer
- Kan användas vid dagliga aktiviteter


Mepiform®

  
Mölnlycke®


## Så här används Mepiform®

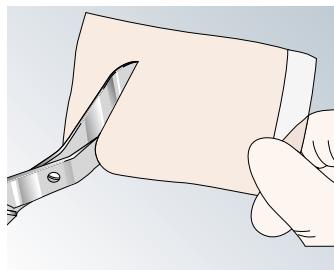

Avlägsna skyddspappret. Vid behov klipp till rätt storlek.

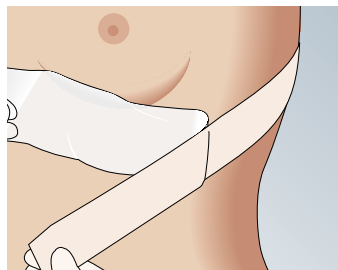

Applicera Mepiform på äret. Säkerställ att huden är ren, torr och fri från eventuell salva etc.

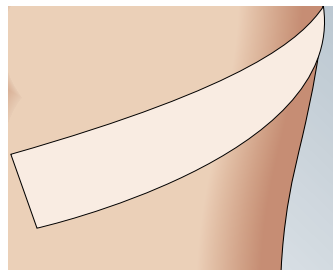

Återapplicera efter daglig rengöring av äret. Torka huden innan Mepiform sätts på igen.



## Så här fungerar Mepiform

Silikon har en bevisad positiv påverkan på hypertrofiska ärr och keloider<sup>4, 5</sup>. Det kan ta 3 månader upp till ett år att förbättra gamla ärr, beroende på ärrvävnadens tillstånd. För optimal effekt ska Mepiform bäras 24 timmar per dag. Det är rekommenderat att Mepiform avlägsnas en gång dagligen, t.ex. vid dusch eller bad, för inspektion och tvätt av huden. För profylaktisk behandling, ska Mepiform användas 2–6 månader beroende på hudens tillstånd.

## Fördelar med Mepiform

- Minskar smärta och vävnadskada vid förbandsbyte
- Ingen extra fixering krävs
- Tunn, flexibel och diskret
- Kan användas vid dagliga aktiviteter
- Kan återappliceras efter avlägsning
- Mepiform kan sitta kvar i flera dagar
- Mepiform har en solskyddsfaktor på SPF 5<sup>6</sup>

Mepiform levereras sterila, enstycksförpackade

| Art.nr. | Storlek cm | Avd fp | Transp fp |
|---------|------------|--------|-----------|
| 293100  | 4 x 30     | 5      | 50        |
| 293200  | 5 x 7,5    | 5      | 25        |
| 293400  | 10 x 18    | 5      | 35        |

## Användningsområden

- Gamla och nya rodnade och upphöjda hypertrofiska ärr och keloider
- Slutna sår som kan förhindra att hypertrofiska ärr och keloider bildas

## Observera

Om maceration eller rodnad skulle förekomma, låt huden vila till dess att symptomen har försvunnit. Fortsätt med behandlingen och öka behandlingstiden gradvis per dag.



Referenser: **1.** Wound Union of Wound Healing Societies. Principles of best practice. Minimising pain at wound dressing related procedures. A consensus document. 2004. Published by Medical Educational Partnership London. **2.** Principles of best practice: Minimising pain at dressing-related procedures. A consensus document. Toronto, Ontario, Canada: ©WoundPedia Inc 2007. **3.** Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. *Jo WC* Vol10, No 2 (2001), p. 7-10. **4.** Mustoe T A et al, International clinical recommendations on Scar Management. *Plast. Reconstr. Surg.* Vol 110, No 2 (2002), p. 560-571. **5.** Maján J.I et al. Evaluation of a self-adherent soft silicone dressing for the treatment of hypertrophic postoperative scars. *Jo WC*, Vol15, No 5 (2006), p.193-6. **6.** Swedish Institute for Fibre and Polymer Research (1998).

Mer information på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00  
The Mölnlycke Health Care name and logo, SafetaC and Mepiform are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

  
**Mölnlycke®**