

# Mepore®

## Självhäftande absorberande förband

Skyddspapper som är lätt att ta av

Hudvänlig, vattenbaserad och lösningsmedelsfri polyakrylathäfta för varsam och säker fixering

Mjuk, elastisk och ickeabsorberande nonwoven med hög andningsgrad

Absorptionsdyna med lågvidhäftande ytskikt

Mepore är ett andningsbart, självhäftande förband för suturerade torra och svagt vätskande sår. Den hudvänliga, vattenbaserade, lösningsmedelsfria polyakrylathäftan ger en varsam men säker fixering.


Mepore®

  
Mölnlycke®

## Så här används Mepore®



Öppna förpackningen och ta ut förbandet.

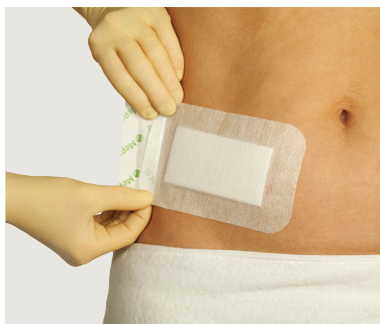

Ta tag i greppkanten på skyddspapperet och lossa det en liten bit så att förbandet kan fästas på huden.



Fäst förbandet på huden utan att sträcka det och ta försiktigt bort resten av skyddspapperet. Stryk och värm med handen över kanterna så att förbandet fäster ordentligt.

## Så här fungerar Mepore

Den porösa strukturen i nonwovenmaterialet gör förbandet ångpermeabelt. Materialet är elastiskt och smidigt vilket gör det möjligt att röra sig obehindrat när förbandet sitter på. Det är icke-absorberande och utgör en barriär som förhindrar blod och sårsekret att läcka igenom. Polyakrylathäftan har utvecklats för att vara hudvänlig samt för att ge säker fixering. Sårdynan kan absorbera måttliga mängder av sårsekret och den lågvidhäftande ytan minskar risken för att den fastnar i såret. Skyddspapperet är lätt att avlägsna och möjliggör enkel och steril applicering.

## Fördelar med Mepore

- Hudvänlig, vattenbaserad häfta
- Kontaktyta med låg vidhäftning som minskar risken för att förbandet ska fastna i såret
- Vätskeavstötande baksida
- Skyddspapper som är lätt att ta av underlättar applicering
- Ångpermeabelt – förebygger maceration och behagligt att bära
- Runda hörn för säker fixering (alla storlekar upp till 8 x 15 cm)

Mepore levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Storlek sårdyna cm	Avd fp	Transp fp
672000	5 x 7	2 x 4	60	480
670800	6 x 7	3 x 4	60	480
672100	8 x 10	3,5 x 6	50	400
672200	8 x 15	3,5 x 10	50	400
671100	9 x 20	4,5 x 15	30	180
671200	9 x 25	4,5 x 20	30	210
671300	9 x 30	4,5 x 25	30	270
671400	9 x 35	4,5 x 30	30	180
Apotekssortiment				
670870	6 x 7	3 x 4	10	140
670970	9 x 10	4,5 x 6	5	100
671070	9 x 15	4,5 x 10	5	70
671170	9 x 20	4,5 x 15	5	70

## Bytesfrekvens

Bytesfrekvensen avgörs av sårets tillstånd. Vid avlägsnande – ta tag i kanten och dra försiktigt av förbandet i hårens växtriktning.

## Användningsområden

Mepore kan användas på ett stort antal svagt vätskande sår, t.ex. suturerade sår, skär- och skrubbsår.

## Observera

Precis som andra självhäftande förband ska Mepore inte sträckas vid applicering eftersom det kan skada huden. Detta är särskilt viktigt när förbandet appliceras över leder. Förbandet ska ej användas på personer med allergi mot någon ingående komponent.



Mepore finns också osteril på 5- och 2-metersrulle

Art.nr.	Storlek cm	Bredd sårdyna cm	Transp fp
5 meter			
331900	4	1,5	24
332000	7	3	18
331980	4	1,5	30
332080	7	3	21

Mer information på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Molnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00  
The Molnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepore are registered trademarks of Molnlycke Health Care AB.