



Käyttöohjeet:

Kasvonsuoja solmittavilla nauhoilla

- A. Muotoile nenävahvike. Aseta kasvonsuoja kasvoillesi siten, että se peittää sekä nenän että suun.
- B. Aseta ylemmät solmittavat nauhat pään päälle ja solmi ne tiukasti, jotta ilmaa ei pääsisi vuotamaan.
- C. Aseta alemmat solmittavat nauhat niskan taakse ja solmi myös ne tiukasti.
- D. Avaa kasvonsuoja aina kokonaan, jolloin läpi hengitettävien kerrosten määrä vähenee.
- E. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä aina leikkausten välissä.
- F. Korvat ja hiukset on peitettävä sopivalla päähineellä hiusten ja muiden hiukkasten leviämisen estämiseksi. Jos on olemassa riski altistua kontaminoituneille nesteille, varmista, että valitset 4-kerroksisen roiskeenkestävän kasvonsuojan visiirillä tai käytät 4-kerroksisen kasvonsuojan lisäksi myös suojalaseja tai visiiriä.
- G. Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.