


# Mepilex® Lite

## Imukykyinen pehmeän silikonin vaahtosidos

- Ei aiheuta vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sidosta poistettaessa
- Mukautuu hyvin kehon eri osiin

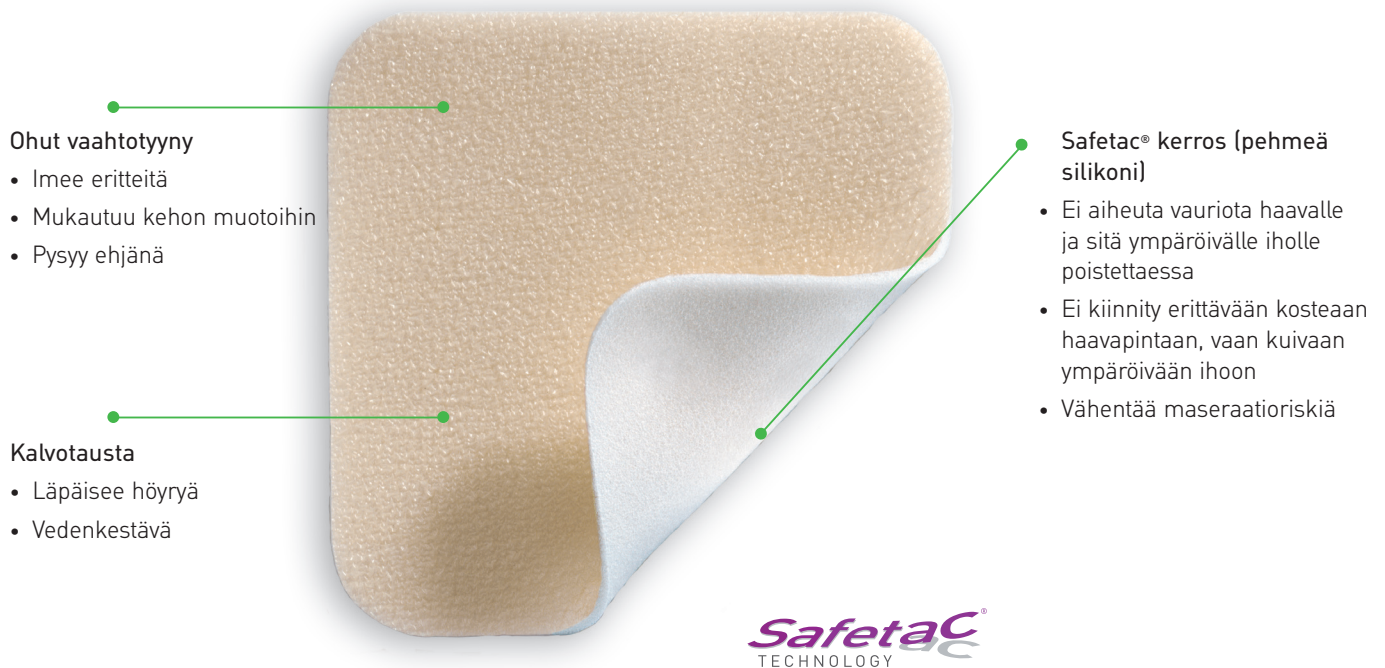


## Miten Mepilex Lite toimii

Mepilex Lite on erittäin mukautuvainen sidos, joka imee tehokkaasti eritteitä ja ylläpitää kosteaa haavaympäristöä. Safetac kiinnityspinta koko tuotteen pinta-alalla kiinnittyy haavaa ympäröivään ihoon, estäen eritteen valumasta ympäröivään ihoon eli pitää maseraatoriskin alhaisena. Safetac kerros varmistaa sidoksen vaihdon ilman vauriota. Mepilex Lite voidaan leikata kehon eri alueille sopivaksi.

## Käyttöalueet

Mepilex Lite on suunniteltu vähän tai ei lainkaan erittävien haa-vojen hallintaan, kuten sääri- ja jalkahaavat, painehaavat, keski- syvät painehaavat, sädehoidosta johtuvat ihovauriot ja niiden ennaltaehkäisy sekä Epidermolysis Bullosa. Mepilex Lite voidaan käyttää myös hauraan ihon suojana, kompression alla sekä yhdessä geelien kanssa.


## Miten Mepilex Litea käytetään

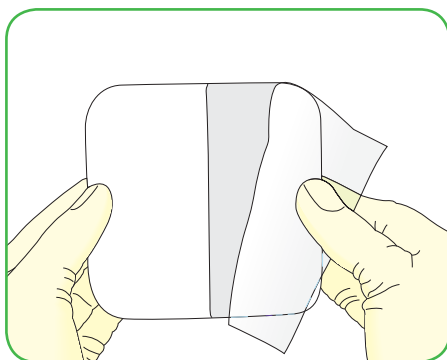

Puhdista haava-alue yleisen käytännön mukaisesti. Kuivaa haava ympäröivä ihoalue hyvin. Käytä suojakalvoa hyväksi sidoksen paikalleen-asettelussa.



Aseta kiinnittyvä pinta haavaa vasten. Mepilex Lite tulee ulottua vähintään 2 cm haavaa ympäröivälle iholle. Tarvittaessa Mepilex Litea voidaan leikata.

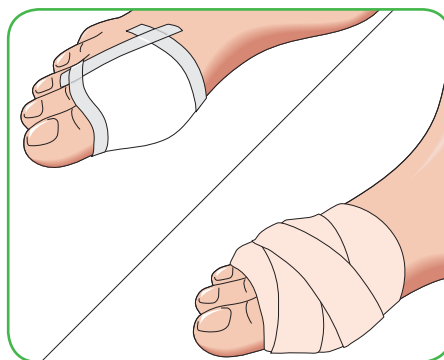

Mikäli tarpeellista, varmista Mepilex Liten kiinnitys teipillä, rullasidoksella tai muulla kiinnitysmateriaalilla.

## Mepilex Liten edut

- Ei vaurioita haavaa ja sitä ympäröivää ihoa sidosta poistettaessa
- Vähentää potilaalle aiheutuvaa kipua sidoksen poiston yhteydessä
- Vähentää maseraatoriskiä
- Mukautuu hyvin kehon muotoihin
- Ohut ja miellyttävän tuntuinen iholle
- Helppo käyttää
- Ylläpitää kosteaa haavaympäristöä
- Voidaan leikata
- Voidaan jättää paikoilleen sädetuksen ajaksi kun käytetään yleisiä energiarajoja ja absorboituneita annoksia.

## Huomaa

Mikäli haavassa esiintyy merkkejä kliinisestä infektiosta, ota yhteyttä terveysalan ammattilaiseen infektihoitoa varten

## Safetac® Teknologia

Safetac on patentoitu pehmeän silikonin kiinnitysteknologia. Safetac takaa hellävaraisen ja varman kiinnittymisen. Safetac vähentää haavalle ja sitä ympäröivälle iholle aiheutuvaa vauriota ja kipua sidosta poistettaessa.

### Referenssit:

Dahlström KK. A New Silicon Rubber Dressing used as a Temporary Dressing before Delayed Split Skin Grafting. Scand J Plast Reconstr. Hand Surg. 1995;29:325-327 Platt A J, et al. A Comparative Study of Silicone Net Dressing and Paraffin Gauze Dressing in skin-Grafted sites. Burns 1996;22:7:543-545. Dykes P, et al. Effect of Adhesive Dressings on the Stratum Corneum of Normal Skin Journal of Wound Care, 2001;10:2:7-10.



Valikoima Tuotenro	Koko cm	Kpl/osasto- pakkaus	Kpl/kuljetus- pakkaus
284000	6 × 8,5	5	70
284100	10 × 10	5	50
284300	15 × 15	5	50
284500	20 × 50	4	24

Steriilisti yksittäispakattu

Mölnlycke Health Care  
Pitäjänmäentie 14, 3 krs  
00380 Helsinki  
Puh. 0201 622 300, Fax. 0201 622 310  
www.molnlycke.com

Mölnlycken symboli ja tekstikuvake ovat  
Mölnlycke Health Caren rekisteröityjä tavaramerkkejä

  
**Mölnlycke®**