

# Mepitac®

## Pehmeän silikonin teippi

- Ei aiheuta vahinkoa iholle poistettaessa
- Ihanteellinen potilaille, joilla on hauras ja herkkä iho
- Mukautuu hyvin kehon muotoihin

### Kudottu kangas

- Mukautuvainen
- Helppo leikata eri kokoisiksi

### Safetac® kerros (pehmeä silikon)

- Ei aiheuta vauriota iholle poistettaessa



### Kalvotausta

- Hengittävä
- Vedenkestävä

**SafetaC**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

## Miten Mepitac toimii


Mepitac on erittäin mukautuvainen ja helppo asettaa ja irroittaa. Safetac kerros takaa varmaan kiinnitymisen eikä aiheuta kipua eikä vedä iho-kerroja poistettaessa. Mepitac voidaan nostaa iholta ja asettaa uudelleen, jos tarkistus on tarpeellista.

Mepitac on ihanteellinen kiinnitysratkaisu potilaille, joilla on hauras ja herkkä iho. Mepitac sopii potilaille, jotka vaativat teipin uudelleenasettelua ja poistoa samalla alueella esim. vastasyntyneet ja dialyysipotilaat.


## Käyttöalueet

Mepitac on suunniteltu kiinnittämään sairaalavälineitä kuten dreenejä, katetreja, putkia, elektrodeja, IV kanyyleja ja sidoksia. Mepitac suojaa hellävaraisesti ihoa esim. putkien alla.


## Miten Mepitacia käytetään

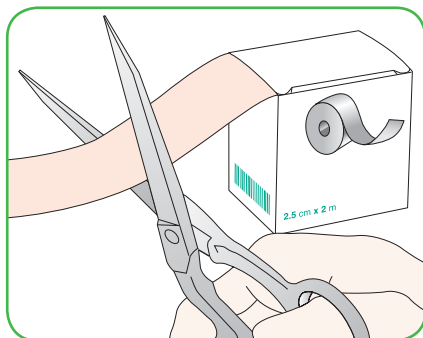

Varmista että iho on puhdas ja kuiva ja ettei siinä ole mitään voiteita yms. Leikkaa teippi saksilla halutun pituiseksi.

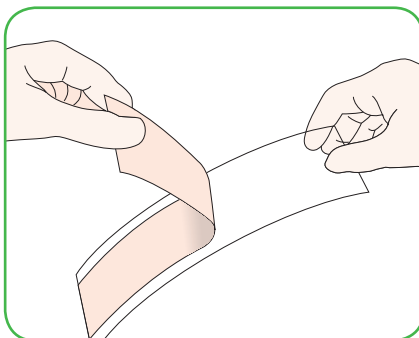

Irroita suojakalvo.

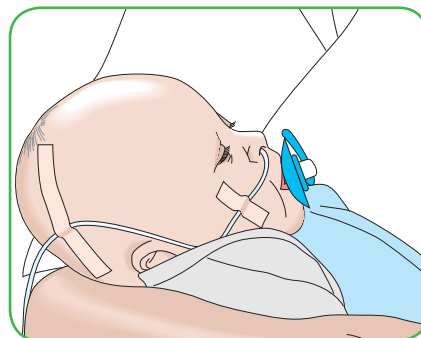

Aseta Mepitac paikoilleen venyttämättä sitä. Mepitacia voidaan nostaa ja asettaa uudelleen paikoilleen, jos tarkistus tai uudelleenasettelu ovat tarpeellisia.

## Mepitacin edut

- Ei vahingoita ihoa poistettaessa
- Mukautuu hyvin kehon muotoihin
- Ei jätä jäännöksiä iholle
- Vedenkestävä
- Hengittävä

## Huomaa

Mepitacin kiinnittyminen voi olla huonompi, jos sitä käytetään kosteissa olosuhteissa, kuten keskoskaappi tai potilaalla, jolla on kuumetta tai joka hikoaa paljon. Mepitacia ei suositella käytettäväksi valtimokatetreissa.

## Safetac® Teknologia

Safetac on patentoitu pehmeän silikonin kiinnitysteknologia. Safetac takaa hellävaraisen ja varman kiinnitymisen. Safetac vähentää haavalle ja sitä ympäröivälle iholle aiheutuvaa vauriota ja kipua sidosta poistettaessa.

## Valikoima

Tuotenro	Koko cm	Kpl/osastopakkaus	Kpl/kuljetuspakkaus
298300	2 x 300	1	12
298400	4 x 150	1	12

Mölnlycke Health Care Oy  
Pitäjänmäentie 14, 3 krs, 00380 Helsinki  
Puh. 0201 622 300  
www.molnlycke.com

Mölnlycken symboli ja tekstikuvake ja Mepitac ovat Mölnlycke Health Caren rekisteröityjä tavaramerkkejä

  
**Mölnlycke®**