

Guida alle lesioni da pressione con i dispositivi medici – Mepilex® Lite

Mepilex® Lite protegge la pelle, assorbe l'umidità ed è stato dimostrato che protegge la cute fragile da forze esterne, come l'attrito e la pressione derivanti dall'uso frequente di dispositivi medici^{1,2}.


Dichiarazione di non responsabilità: l'uso profilattico delle medicazioni nella riduzione del rischio di lesioni da pressione correlate ai dispositivi medici è ben segnalato, tuttavia il loro uso in I DPI in termini di manutenzione di un sigillo e potenziale impatto sulla trasmissione virale non sono stati testati da Mölnlycke o altri a nostra conoscenza.

- Mepilex Lite può essere facilmente ritagliata nella forma desiderata
- Mantenere la pellicola protettiva quando si ritaglia Mepilex Lite
- Mepilex Lite fornisce un'adesione delicata sulla cute con la tecnologia SafetaC®



SafetaC
TECHNOLOGY

Le illustrazioni esemplificano le aree di protezione dei dispositivi medici



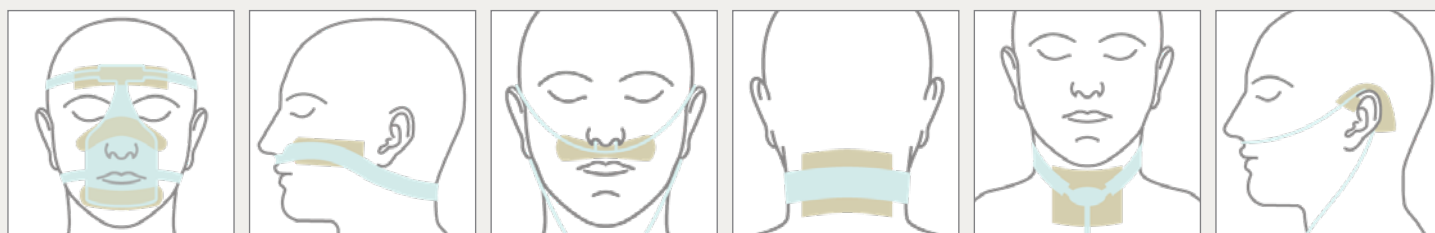


Mepilex® Lite


Mölnlycke®

Guida al taglio della medicazione

Scegliere le dimensioni più appropriate della medicazione per coprire l'area interessata e tagliare per personalizzare in base alle esigenze specifiche del paziente / contorni del corpo o forme del dispositivo. Applicare il lato aderente sulla pelle.

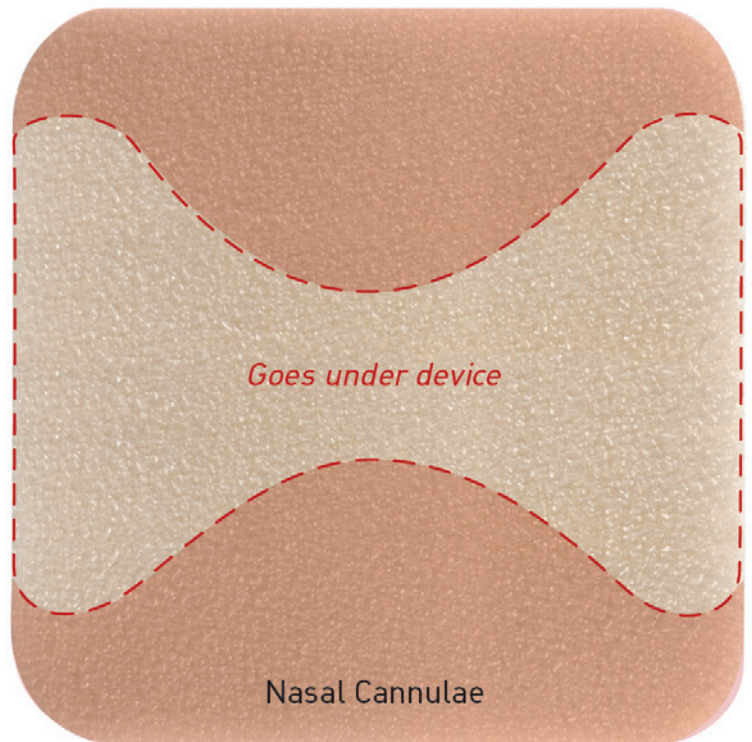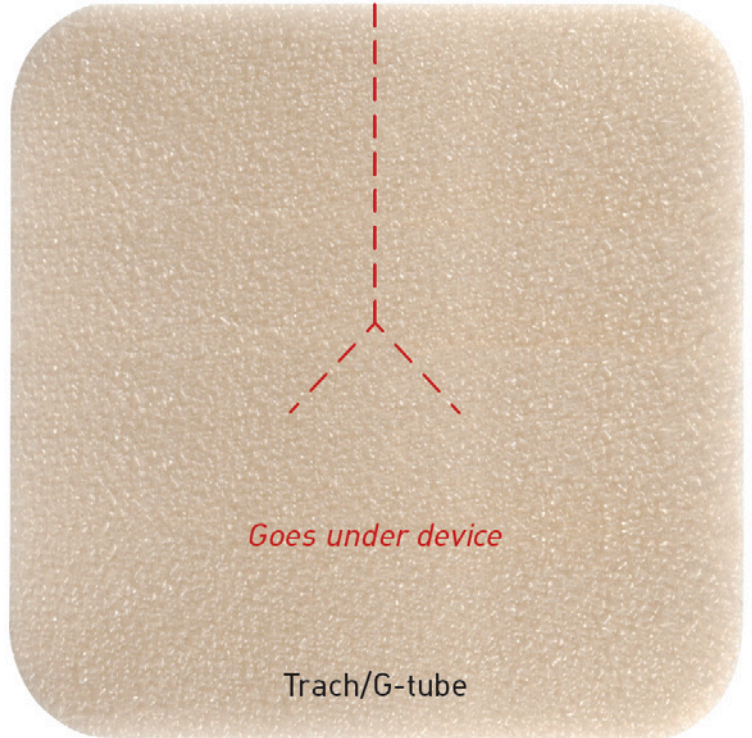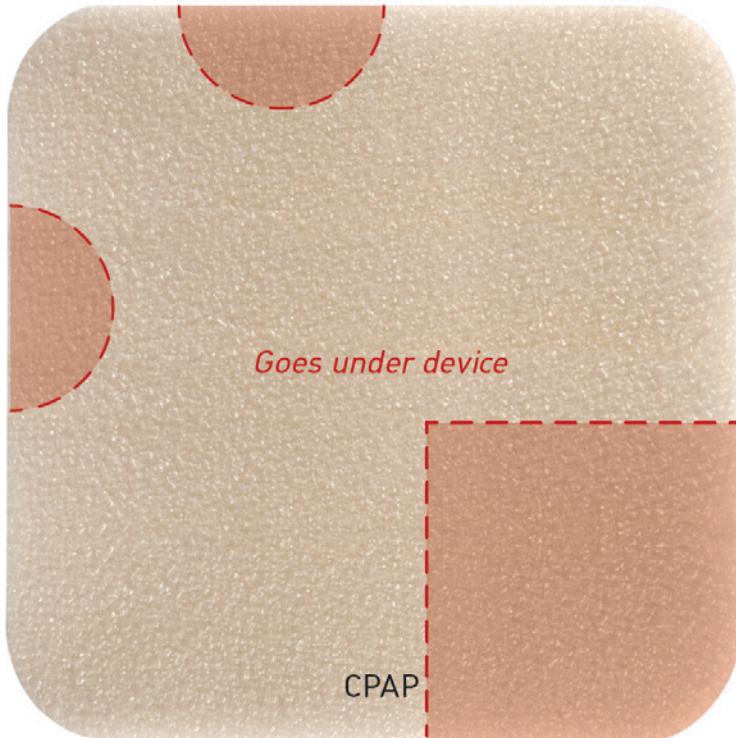

SafetaC
TECHNOLOGY

Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite nel presente documento non devono essere interpretate come la pratica della medicina o sostituite al giudizio medico indipendente di un paziente in trattamento clinico. Queste informazioni, incluso ma non limitato ai suggerimenti per il tempo di usura del prodotto, la selezione del prodotto e l'uso suggerito si basano su generalizzazioni e non considerano le caratteristiche uniche della ferita di un individuo. Il clinico di ciascun paziente rimane l'unico responsabile della valutazione della gravità delle ferite del paziente, della determinazione del trattamento appropriato e della gestione del trattamento della ferita.

Per saperne di più visita il sito: www.molnlycke.it

Mölnlycke Health Care Srl, Via Marsala, 40/C Gallarate VA, Italia, Tel +39 0331 714011. I marchi commerciali, i nomi e i loghi Mölnlycke, BARRIER sono registrati a livello globale a nome di una o più società del Gruppo Mölnlycke Health Care © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. ITWCU0315912


Mölnlycke[®]