



Sådan anvender du: Medicinsk ansigtsmaske med visir

Hvis der er risiko for væskestænk, skal du altid anvende enten en 4-lags stænkresistent medicinsk ansigtsmaske med visir eller en 4-lags stænkresistent maske kombineret med beskyttende briller eller visir.

- A. Før du tager masken på, skal visiret foldes langs siderne for at opnå optimal beskyttelse mod stænk fra siden, der kan komme i kontakt med øjnene.
- B. Form næseklemmen.
- C. Fold masken helt ud.
- D. Placer masken på dit ansigt, så den dækker både næse og mund.
- E. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage.
- F. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.
- G. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.
- H. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.
- I. Smid masken væk efter brug.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
 Mölnlycke og Barrier varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Mölnlycke®