



Lyofam[®] Max

Højabsorberende polyuretan skumbandage

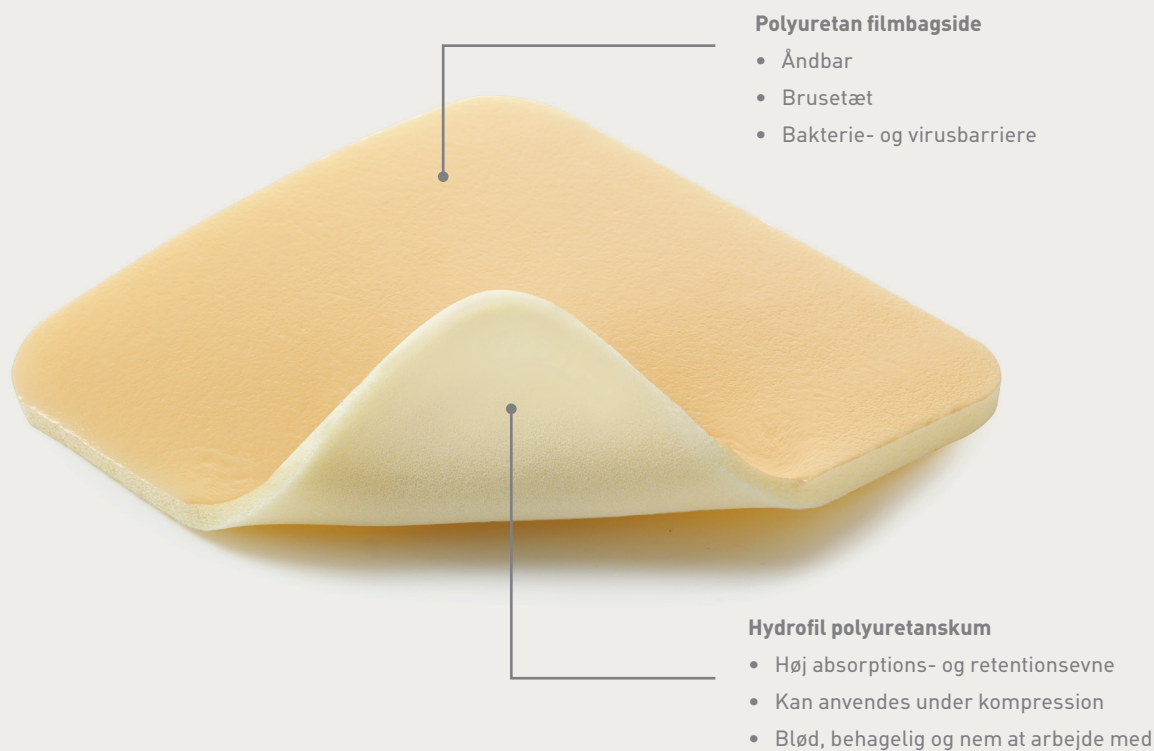


Lyofam[®] Max er en højabsorberende skumbandage. Bandagen består af polyuretan skum og en brusetæt bagsidefilm med høj åndbarhed, som sikrer en effektiv væskehåndtering af moderat til kraftigt væskende sår.


Sådan anvendes Lyofoam® Max

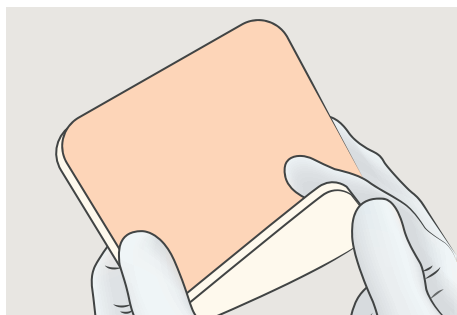

1. Rens såret efter normal procedure og vælg en passende størrelse.

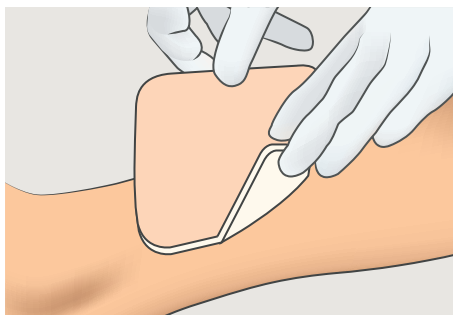

2. Placér skummen direkte ovenpå såret. Lyofoam Max skal overlape sårlejet med mindst 2 cm.

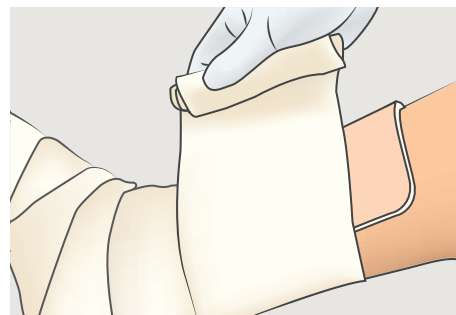

3. Fiksér Lyofoam Max med tape, tubebandage (fx. Tubifast® 2-Way Stretch) eller anden fiksering.

Anvendelsesområde

Lyofoam® Max er udviklet til at kunne håndtere eksudat fra moderat til kraftigt væskende sår, såsom bensår eller tryksår. På grund af dens gode væskehåndtering skaber Lyofoam Max et fugtigt sårmiljø, som sikrer en optimal sårheling.

Fordele ved Lyofoam Max

- Høj absorptions- og retentionsevne¹
- Minimerer risikoen for maceration og lækage og kan blive siddende på i længere tid¹
- Brusetæt bagsidefilm, der fungerer som en barriere mod bakterie og virus gennemtrængning
- Kan anvendes under kompression
- Nem at applicere og fjerne
- Blød og behagelig for patienten
- Minimal risiko for hudirritation og allergi
- Bred vifte af størrelser til forskellige sårtyper

Skiftfrekvens

Lyofoam Max kan blive siddende på i flere dage, afhængig af sårets tilstand og væskniveau.



Lyofoam Max er pakket i sterile engangspakninger

Varenr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
603200	7,5 x 8,5	10	120
603201	10 x 10	10	60
603203	10 x 20	10	60
603204	15 x 15	10	70
603205	15 x 20	10	60
603206	20 x 20	10	80

Referencer

1. SMTL reports
 - Report No. 11/3674/1
 - Report No. 11/3571/2
 - Report No. 11/3571/3
 - Report No. 11/3571/6
 - Report No. 11/3571/7

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Tlf + 45 48 168 268, info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke, Lyofoam Max og Tubifast varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0321808


Mölnlycke®