



Mesorb®

Absorberende bandage med lækagebarriere

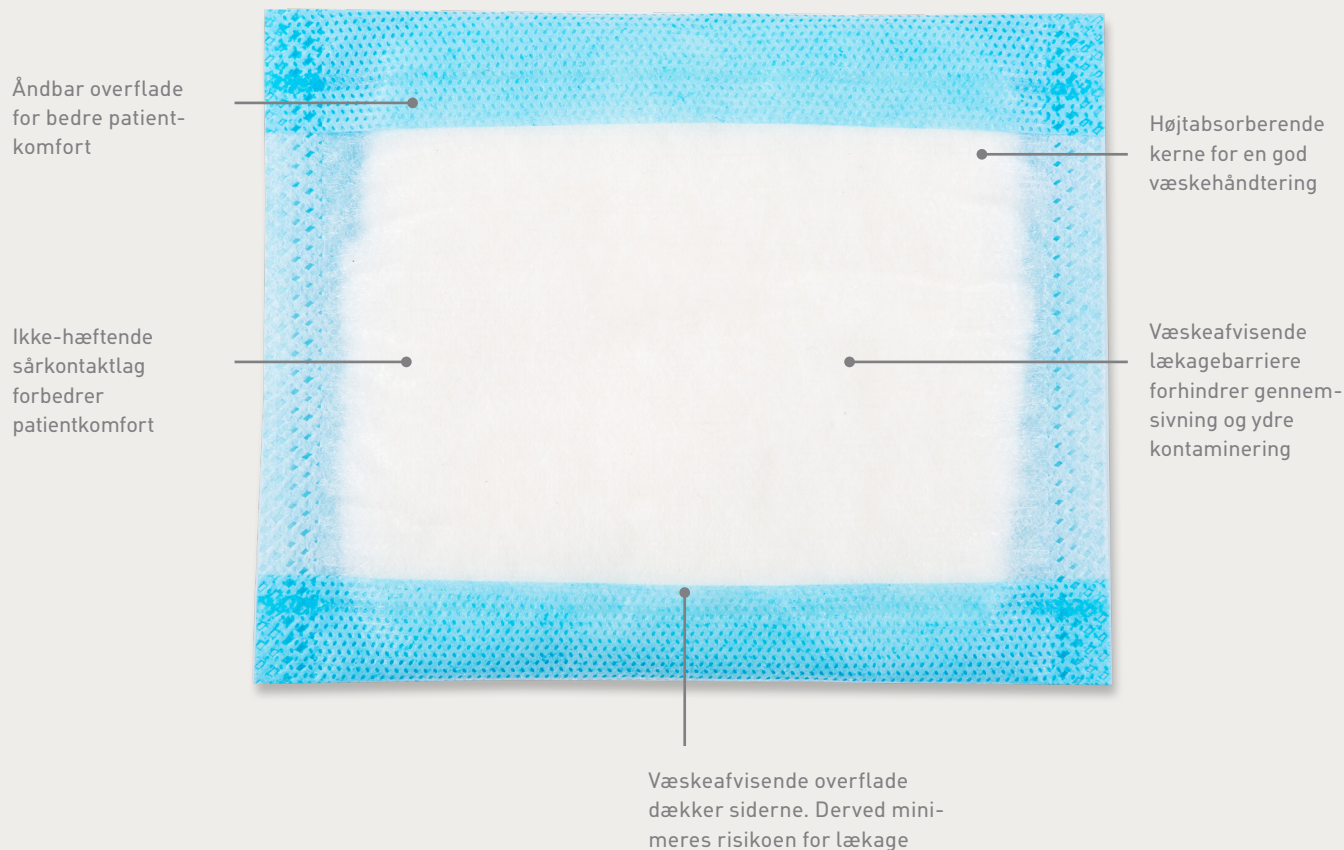


Mesorb® er en blød, højtabsorberende bandage til kraftigt væskende sår. Den væskeafvisende lækagebarriere hjælper med at forebygge, at eksudatet siver ud på tøj og sengetøj.


Sådan anvendes Mesorb®

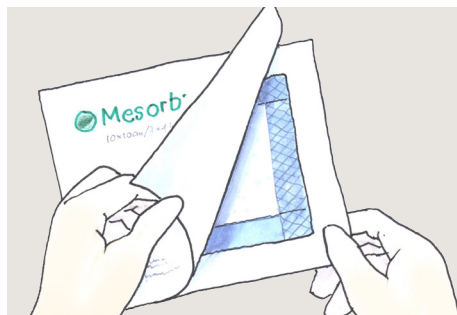

1. Pakken åbnes og bandagen tages ud.

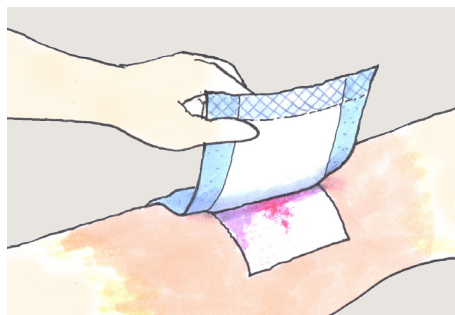

2. Applicér Mesorb® på sårområdet eller på den valgte primærbandage med mindst 1 cm overlap på den omkringliggende hud.

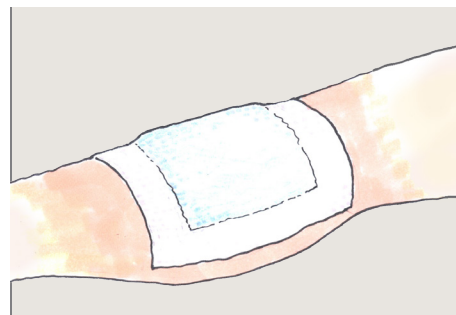

3. Fikses med eksempelvis Mefix®, Mepitel Film®, Mepore® Film eller Tubifast®.

Sådan virker Mesorb

Eksudatet ledes ind i Mesorb gennem det ikke-hæftende kontaktag. Den højtabsorberende kerne absorberer eksudatet, giver en optimal ventilering af såret og skaber en beskyttende effekt. Den væskeafvisende bagside hindrer lækage opadtil samt ud til siderne.


Anvendelsesområder

Mesorb er udviklet til at kunne håndtere eksudat fra moderat til kraftigt væskende sår.

Mesorb kan anvendes som primærbandage direkte på såret eller som sekundærbandage, hvor der er behov for en højtabsorberende bandage. Eksempelvis sammen med Mepitel® One eller Mepilex® Transfer.

Skiftfrekvens

Mesorb kan sidde på i adskillige dage afhængig af såret og hudens tilstand, eller ifølge klinisk praksis.

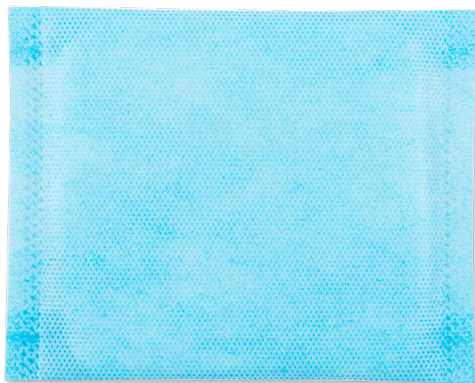

Fordele ved Mesorb

- Højtabsorberende
- Tilbageholder stor væskemængde i absorptionskernen
- Åndbar
- Omkostningseffektiv
- Den unikke, væskeafvisende lækagebarriere reducerer skiftfrekvensen og forebygger gennemsvivning

Forholdsregler

Mesorb bør ikke appliceres på inficerede sår uden at konsultere det ansvarlig personale.

Mesorb er pakket i sterile engangspakninger

Varenr.	Str. cm	Stk/inder.krt.	Stk/trp.krt.
677001	10 x 13	50	400
677201	13 x 15	50	300
677401	10 x 23	50	300
677601	15 x 23	50	300
677701	23 x 25	30	120
677801	23 x 30	30	120

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Tlf + 45 48 168 268, info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke, Mesorb, Mepitel, Mepilex, Mefix, Mepore Film, Tubifast varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0241808


Mölnlycke®