

Mepore®

Pansement chirurgical auto-adhésif et absorbant

- Le feuillet protecteur à repli facilite l'application.

- L'adhésif polyacrylique aqueux, sans solvant, assure une fixation efficace qui respecte la peau.



- Polyester non-tissé hydrolié, au pouvoir imper-respirant élevé, doux et confortable

- Le coussinet absorbant doublé d'une couche de contact hypoadhérente améliore le confort et permet le port prolongé.

- Mepore® est un pansement auto-adhésif, absorbant et perméable à l'air, conçu spécialement pour les plaies chirurgicales. Son adhésif de polyacrylate aqueux, sans solvant, respecte la peau et assure une fixation solide et délicate à la fois. Mepore® est doux, souple, imperméable et transparent aux rayons X.

Mepore®


Mölnlycke®

Application de Mepore®



1. Retirer la partie externe du feuillet antiadhérent.



2. Poser délicatement sur la peau à une extrémité de l'incision. NE PAS ÉTIRER.



3. Retirer l'autre moitié du feuillet et lisser la bordure adhésive sur la peau.

Fréquence des pansements

Renouveler le pansement Mepore selon l'état de la plaie et le protocole prescrit. Pour enlever le pansement, décoller le bord supérieur et tirer lentement dans le sens des poils.

Mode d'action de Mepore®

Le polyester non-tissé est perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Très souple, il épouse bien les formes du corps. Il n'absorbe pas les liquides et forme une barrière hydrofuge contre le sang et autres épanchements. L'adhésif polyacrylique est à la fois solide et doux pour la peau. Le coussinet de contact offre le niveau d'absorption idéal pour les plaies chirurgicales suturées. Il est doublé d'une couche hypoadhérente. Mepore® est transparent aux rayons X. On peut le laisser en place pendant la radiographie.

Avantages de Mepore®

- Adhésif aqueux respectant la peau.
- Le coussinet absorbant, hypoadhérent, garde la plaie propre, diminue le risque de contamination et d'adhérence à la plaie, et réduit la fréquence des pansements.
- Couche externe flexible et imperméable.
- Perméable à l'air, prévient la macération, améliore le confort.
- Coins arrondis pour une fixation solide (jusqu'à 9 x 15 cm)

Sélection Mepore® (Emballage stérile)

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
670800	6 x 7	60	480
670900	9 x 10	50	400
671000	9 x 15	50	400
671100	9 x 20	30	180
671200	9 x 25	30	210
671300	9 x 30	30	270
671500	10 x 11	40	280

Sélection Mepore® Non-Stérile

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
331900	4 cm x 5 m	1	24
332000	7 cm x 5 m	1	18

Mepore® non stérile est offert en rouleaux de 5 mètres.

Mölnlycke
1-800-494-5134
www.molnlycke.ca

Mölnlycke Health Care AB, C.P. 13080, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46317223000.
Les noms et logos respectifs de Mölnlycke Health Care et Mepore® sont déposés partout dans le monde à une ou plusieurs des compagnies Mölnlycke Health Care.
© 2018 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.

Indications

Ce pansement absorbant stérile auto-adhésif est conçu pour les plaies faiblement à modérément exsudatives telles que les plaies chirurgicales, les coupures et les écorchures.

Précautions

- Assurez-vous de ne pas étirer Mepore lors de la pose, afin d'éviter que les forces de cisaillement n'abîment la peau. Ceci est particulièrement important lors d'une application sur des articulations.
- Mepore ne doit pas être utilisé sur des patients présentant une hypersensibilité aux masses adhésives acryliques, ou sur des personnes ayant une peau très fragile ou pouvant être facilement lésée.
- Ne pas réutiliser le pansement. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca




Mölnlycke®

CFWC01011905