

# Hvordan bruke BARRIER® EasyWarm®+ aktivt selv-varmende teppet

## Gjør



Åpne og fold teppet helt ut **30 minutter** før bruk



Ta teppet i bruk **30 minutter** før inngrepet for å **oppretholde kroppstemperaturen**



Plasser teppet med **varmeputene opp**



Etter bruk, **kastes teppet som vanlig avfall** (kan brennes)



**Brukes under tilsyn** av kvalifisert helsepersonell



Pasientens hud bør **sjekkes regelmessig**.



## Pass på



**Må ikke legges dobbelt.** Må alltid foldes helt ut



Pasienten skal **aldri** ligge oppå teppet



**Unngå tyngde** og stramme reimer på varmeputene



**Ikke legg teppet over** berørt område under røntgen. Fjern teppet ved MR



Teppet skal ikke brukes til barn

**Merk:** Teppet skal ikke brukes på pasienter med alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - alvorlig hypotensjon eller hvis langvarig hypotensjon kan forventes - alvorlige, perifere vaskulære sykdommer - hjertekirurgi - alvorlig hjertesvikt/kardiogent sjokk



**1.** Riv opp pakken ved hjelp av fliken i øvre venstre hjørne. Ta teppet ut av emballasjen slik at BARRIER® EasyWarm®+ eksponeres for luft.



**2.** Åpne og fold ut BARRIER® EasyWarm®+ helt, unngå å legge teppet dobbelt. Teppet får en gjennomsnittstemperatur på 44°C innen 30 min og beholder temperaturen i opptil 10 timer. Hudtemperaturen under hver varmepute når en makstemperatur på 42°C.



**3.** Plasser BARRIER® EasyWarm®+ med varmeputene opp, og den hvite siden mot pasienten. Teppet er fleksibelt og utformet for å passe flere typer leiringer ved at det kan deles opp i flere deler. Teppets øvre og nedre del kan



enkelt deles og settes sammen igjen med borrelås. (Den nedre delen kan deles inn i to ekstra deler ved å klippe det på den angitte linjen.)

## Fordeler

- Bidrar til å forhindre hypotermi perioperativt<sup>1</sup>
- Enkelt og raskt i bruk
- Enkelt å bruke før, under og etter operasjon
- Lett tilgjengelig og krever ikke tilleggsutstyr
- Innovativt design som gjør det mulig å dele teppet for å dekke overkropp og/eller nedre del av kroppen

### Referanser:

1. Clinical study to assess the safety and efficacy of BARRIER® EasyWarm®, an active self-warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2012.



Finn ut mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Tlf 22 70 63 70. [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)  
Navnene BARRIER® og EasyWarm®+ og de respektive logoene er registrerte varemerker for Mölnlycke Health Care.  
Copyright (2012)

**BARRIER® EasyWarm®+**

**Mölnlycke®**