

Påkledningsveiledning for Biogel® Indicator® System

ÅPEN metode

Ta på den sterile frakken og åpne ytter -og inneremballasjen som anbefalt*



1. Ta den første fargede hansken ut av innerpakken med din ikke-dominante hånd. Plasser tommel og pekefinger på din andre hånd på folden av den vrengte mansjetten i tråd med hanskehåndflaten og trekk hansken over hånden.



2. La mansjetten være bakovervendt.



3. Ta den andre fargede hansken ut av pakken ved å plassere påklede hanskefingre under den vrengte mansjetten. Med strak arm og lett bøyd albue føres hånden uten hanske inn i hansken.



4. Trekk hansken over frakkemansjetten samtidig som du beveger armen.



5. Trekk hansken helt på plass. Sørg for at hansken dekker frakkemansjetten med en margin på ca. 10 cm. Følg samme prosedyre på den andre hansken.



6. Åpne ipakken med de stråfargede ytterhanskene. Før fingrene fra den ene hånden med hanske inn i den første ytterhansken. Strekk hansken for å sikre optimal komfort og passform. Trekk hansken helt på plass og gjenta prosedyren med den andre ytterhansken.



7. Ta på ytterhanskene. Påse at ytterhansken er trukket godt over innerhansken (ca 2,5cm) for å unngå at den ruller eller sklir ned. Trykk kantene av hanskens mansjetter godt ned mot frakken for at antiskli-kanten i hansken sitter fast på frakken.



8. Når hanskepåtagningen og evt. justeringen er avsluttet, skal du strekke armene for å sikre deg at hanskene sitter riktig.

Bytting av kontaminert/punkttert hanske under operasjon.



9. Dersom en punksjon oppstår i nærvær av væske blir den synlig ved at det dannes en mørk flekk på punksjonsstedet i ytterhansken.



10. Ta av ytterhansken ved å dra mansjetten over håndflaten slik at hansken har innsiden ut. Kast den kontaminerte/punkterte hansken.



12. Sjekk innerhansken for punksjon. Dersom punkttert, fjern og erstatt hansken etter lokale anbefalinger eller rengjør og tørk sterilt.

Åpne en ny hanskepakke med de korrekte Biogel Indicator systemet fungerer på tiltenkt måte. Ta på deg ytterhansken slik at mansjetten på ytterhansken er trukket godt over mansjetten til innerhansken (ca. 2,5 cm) for å unngå at hansken ruller eller sklir ned.

Besøk vår hjemmeside for videoveiledning til påtagning av frakk og operasjonshansker.

Referanse: * Folin A. Utpakning av Indicator-dobbelthanskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf 22 70 63 70. info.no@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care og Biogel navn og logo er registrerte varemerker globalt til Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0611905


Mölnlycke®