



Påkledningsveiledning: Operasjonsmunnbind med visir

Dersom det er risiko for væskesprut, pass på at du enten benytter 4-lags sprutsikkert operasjonsmunnbind med visir eller 4-lags sprutsikkert operasjonsmunnbind og vernebriller.

- Dersom det er risiko for væskesprut, pass på at du enten benytter 4-lags sprutsikkert operasjonsmunnbind med visir eller 4-lags sprutsikkert operasjonsmunnbind og vernebriller.
- Form nesebøylen slik at visiret bøyer seg ut fra munnbindet og åpner lufting nedenfra.
- Dra i operasjonsmunnbindet fra øverst til nederst for at det skal legge seg riktig.
- Plasser operasjonsmunnbindet slik at du dekker nese og munn.
- Plasser de øvre knytebåndene på toppen av hodet og stram til for å unngå lekkasje på sidene.
- Plasser de nedre knytebåndene i nakken og stram til.
- Fold alltid munnbindet helt ut for å minimere antall lag du må puste gjennom.
- Bytt operasjonsmunnbind dersom det er kontaminert og mellom operasjoner.
- Kast munnbindet etter bruk.