

# Mepilex® Lite


## Absorberende myk silikonbandasje

### Tynn, absorberende skumpute

- Absorberer sårveske
- Velegnet til bruk under kompresjon
- Former seg etter kroppen


### Safetac® lag \*\*

- Reduserer smerte og skade før, under og etter bandasjeskift<sup>1\*\*</sup>
- Fester seg skånsomt til tørre overflater, slik som hud<sup>2\*\*</sup>, men ikke til fuktige såroverflater<sup>3\*\*,4\*\*</sup>
- Forsegler sårkantene og reduserer risikoen for maserasjon<sup>5\*\*-7\*\*</sup>

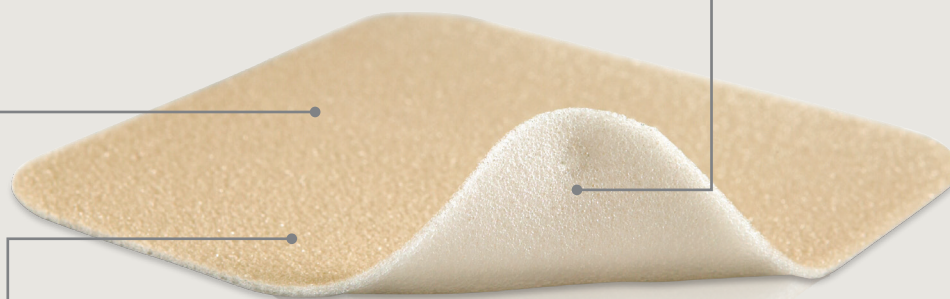

### Polyuretan baksidelfilm

- Pustende
- Vanntett
- Bakterie – og virusbarriere\*

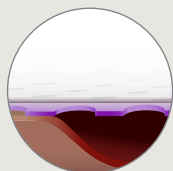

### Safetac® teknologi

Safetac er en unik produsenteid teknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex®-familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.




- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning<sup>1,2</sup>
- Former seg etter kroppen
- Kan klippes

Mepilex® Lite

  
Mölnlycke®


## Hvordan bruke Mepilex® Lite

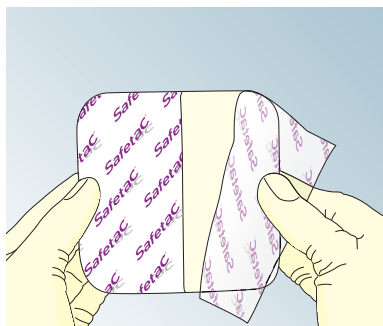

Rens sårområdet i henhold til normale prosedyrer. Tørk omkringliggende hud ordentlig. Benytt releasefilmene som hjelp under applisering.



Legg den heftende siden mot såret ute å strekke bandasjen. Mepilex Lite bør overlape omkringliggende hud med minst 2 cm. Mepilex Lite kan klippes til etter behov.

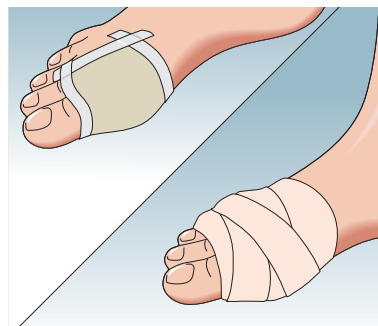

Fiksér Mepilex Lite med annen fiksering.

## Slik fungerer Mepilex Lite

Mepilex® Lite er en meget komfortabel skumbandasje som absorberer eksudat og opprettholder et fuktig sårmiljø. Bandasjen danner en barriere rundt sårkantene og hindrer lekkasje på omkringliggende hud, og minimerer derfor risikoen for maserasjon. Safetac-laget sikrer atraumatiske bandasjeskift. Mepilex Lite kan klippes til for å passe ulike sårtyper og kroppsdeler.

## Fordeler med Mepilex Lite

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud
- Minimerer smerte hos pasienten ved fjerning
- Minimerer risikoen for maserasjon
- Former seg etter kroppen
- Tynn og komfortabel
- Enkel å håndtere
- Opprettholder et fuktig sårmiljø
- Kan klippes til riktig fasong
- Kan ligge på ved strålebehandling
  - Påvirker ikke stråledosen til tumor
  - Øker ikke huddosen

## Bruksområder

Mepilex Lite egner seg til en rekke ikke- til lite væskende sår som for eksempel legg- og fotsår, trykksår, delhuds-brannskader, strålereaksjoner og Epidermolysis Bullosa. Mepilex Lite kan også brukes som beskyttelse på skjør og utsatt hud. Mepilex Lite kan brukes under kompresjon eller i kombinasjon med geler.

## NB!

Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom man setter i verk infeksjonsbehandling.

## Hva er Safetac teknologi?

Safetac er en produsenteid teknologi for skånsom men sikker fiksering med myk silikon. Safetac minimerer skade og smerte på såret og omkringliggende hud ved bandasjeskift.<sup>1-3</sup>



Mepilex Lite er pakket i sterile enhetspakninger

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	2	12

Referanser: 1. White R, A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritation and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-10

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70  
The Mölnlycke, Mepilex, Mepitac, Mepiform, Mepitel and Safetac names and logos, are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. (c) 2018. Mölnlycke Health Care. All rights reserved.

  
**Mölnlycke®**