



VERSÃO 1

INSTRUÇÕES DE USO

Mepore®

Nome Comercial: Mepore®

Nome Técnico: Curativo

Modelos: Mepore 6x7cm, Mepore 9x10cm, Mepore 9x15cm, Mepore 9x20cm, Mepore 9x25cm, Mepore 9x30cm, Mepore 9x35cm

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico: <http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone: (90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

"Produto médico estéril"

"Produto médico esterilizado por óxido de etileno"

"Fabricante recomenda uso único"

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

Código do Produto	Produto e Dimensão	Quantidade por embalagem secundária
670800	MEPORE 6x7 cm	60
670900	MEPORE 9x10 cm	50
671000	MEPORE 9x15 cm	50
671100	MEPORE 9x20 cm	30
671299	MEPORE 9x25 cm	30
671300	MEPORE 9x30 cm	30
671400	MEPORE 9x35 cm	30

Composição

Camada de não tecido: fibras de poliéster Adesivo: acrílico a base de água.

Camada em contato com a ferida: não-tecido perfurado feito de polipropileno e viscose, e uma camada de contato feita de polietileno e polipropileno, e não-tecido de polipropileno.

Película protetora: papel siliconado.

Mepore

O Mepore é um curativo para proteção de feridas. O produto é constituído por 4 camadas, e o princípio de funcionalidade de cada camada é descrita a seguir:

- 1) A borda adesiva sela a área circundante da ferida de modo a evitar contaminações externas.
- 2) A camada que cobre a ferida é feita de não tecido de viscose revestido com uma camada de polímero para dar uma superfície lisa com baixo nível de aderência.
- 3) O revestimento exterior, em poliéster, torna o produto permeável e altamente flexível, permitindo que este se adapte perfeitamente aos contornos do corpo. Esta camada de poliéster é repelente a água e fornece uma proteção física à ferida.
- 4) O curativo está protegido por duas películas protetoras, fáceis de remover e que permitem uma colocação totalmente asséptica do curativo.



Indicação de Uso

Mepore® é um dispositivo médico não-invasivo, que entra em contato com a pele lesada. É um curativo absorvente autocolante concebido para feridas com exsudado reduzido a moderado, tais como feridas cirúrgicas, cortes e abrasões. O tempo de permanência do produto na pele é dado pela condição da ferida, em conformidade com as práticas clínicas aceitas.

O uso do Mepore® deve ser supervisionado por um profissional de saúde qualificado.

Modo de utilização

1. Abrir a embalagem. Retirar o curativo.
2. Pegar nas pontas das duas películas destacáveis de forma a expor a parte adesiva, permitindo a fixação do curativo. Colocar o curativo na pele sem esticar e puxar cuidadosamente as películas destacáveis.
3. Suavemente fixe o bordo adesivo à pele.
4. Não estique o curativo ao aplicar.
5. A frequência de mudança do curativo depende da situação em que a ferida se encontre.
6. Para retirar o curativo, pegue numa extremidade e puxe cuidadosamente na direção do crescimento dos pelos.

Precauções, Advertências e Contra-Indicações

Não utilizar se a embalagem interior tiver sido danificada ou aberta antes da utilização.

Não reesterilizar.

Se o produto for reutilizado, a sua eficácia pode diminuir e poderá ocorrer contaminação cruzada.

Deve ter-se o cuidado de não esticar o Mepore para não agredir a pele.

Este aspecto é particularmente importante quando o curativo é aplicado sobre articulações.

Condições de Armazenamento e Transporte

Armazenar em temperatura ambiente.

Transportar o produto em sua embalagem original fechada.



DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem

VALIDADE: Vide embalagem.

REGISTRO ANVISA: 80117580268

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luiz Levy Cruz Martins CRF - 42415

IMPORTADOR:

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca

São Paulo-SP

CEP – 05001-200

E-MAIL: brazilvigilance@ul.com

CNPJ: 04.967.408/0001-98

Fabricante Legal:

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 - Suécia

Fabricante Real:

Mölnlycke Health Care, Oy,Saimaankatu 6,Mikkeli, Finlândia 10, FI-50101