


# BARRIER® Extremitetslakan med Drisite® Plus



- Drisite® Plus för god vätskehantering där materialet utsätts för rikligt med vätska
- Förstärkt material i det kritiska området för bättre hållbarhet och infektionskontroll
- Tredimensionell design för att på ett effektivt sätt säkerställa sterilt område
- Integrerade slanghållare underlättar instrumentering
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet

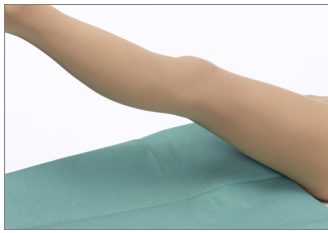

1. Vik ut lakanet och placera det under patientens ben.



2. Alt. 1: Täck benet med den självhäftande handduken och fixera



2. Alt. 2: Klä in benet i ortopedi-strumpan.



3. Fixera den med op-tejp.



4. Placera det hopvikta extremitetslakanet över patientens fot med riktningsspilen riktad mot huvudändan.



5. Vik ut ena sidan av operationslakanet och överräck det till en assistent. Lyft patientens ben och dra extremitetslakanet upp över patientens knä. Vik ut sidorna på operationslakanet.



6. För in handen genom det elastiska hålet, fatta tag i lakanet upp



7. Vik ut operationslakanets övre del över narkosbågen.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtionsyta	Avd/trp
60206	Extremitetsset: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Instrumentbordslakan 1 x Häftande op-handduk 2 x Op-tejp 1 x Extremitetslakan, elastikst hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 150 x 190cm 75 x 75cm 9 x 49cm 200/300 x 320cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm 75 x 190cm	4 / 4
60214	1 x Extremitetslakan, elastikst hål 7cm, inslagen	200/300 x 320cm		7 / 14

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke® kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70214	Extremitetslakan, elastikst hål 7cm	200/300 x 320cm

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0411803

**Mölnlycke®**